

1.

Materialbeschreibung

- A. 2 Lt Sauerstoffflasche (A)
 - Restdruckventil (A1)
 - großes Handrad (A2)
- B. Basis Druckminderer (B)
 - Überwurfmutter (B1)
 - Constant Flow (B2)
 - manuell regelbar von 0 - 15 Lt/minute (B3)
- C. Oxymaske (C)
 - Verbindungsschlauch (C1)

2.

Montageanleitung

1. Druckminderer und Sauerstoffflasche verbinden:
(B1) auf (A1) manuell aufschrauben.
(nie mit Werkzeug zusammenschrauben!)
2. OxyMaske (C) und Druckminderer (B) verbinden:
(C1) auf (B2) manuell aufsetzen

3.

Gebrauchsanleitung

atmende Person:

1. Maske (C) der betroffenen Person aufsetzen
 2. Constant flow auf 15 Lt/minute manuell mit (B3) einstellen
 3. Sauerstoffflasche (A) mit Handrad (A1) langsam manuell aufdrehen
- Jetzt ist constant flow Sauerstoffzufuhr möglich.

Achtung!!!

Bitte stets beim Arbeiten mit reinem Sauerstoff die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beachten!
Fernhalten von Zündquellen, offene Flammen vermeiden - nicht rauchen - Funkenbildung vermeiden
kein Gebrauch von Ölen und Fetten - Sauerstoffflaschen stets sicher lagern