

1.

## Materialbeschreibung

- A. 2 Lt Sauerstoffflasche
  - Restdruckventil (A1)
  - großes Handrad (A2)
- B. Plus Druckminderer
  - Überwurfmutter (B1)
  - Constant Flow (B2)
  - manuell regelbar von 0 - 25 Lt/minute (B3)
  - 2 DISS - Anschlüsse (B4)
- C. Oxymaske
  - Verbindungsschlauch (C1)
- D. Sauerstoffschlauch,
  - 1m lang, mit 2 Schraubanschlüssen (D1)
- E. Demandventil
  - Verbindungsventil (E1) für Sauerstoffschlauch (D1)
  - Aufsatzmöglichkeit (E2) für Maske / Mundstück
  - Beatmungsknopf (E3)
- F. Atemmaske / Beatmungsmaske
  - Befestigungsmöglichkeit (F1) auf Demandventil (E2)
- G. Mundstück
- H. Nasenklemme
- I. Erste Hilfe Materialien

2.

## Montageanleitung

1. Druckminderer und Sauerstoffflasche verbinden:  
(B1) auf (A1) manuell aufschrauben.  
(nie mit Werkzeug zusammenschrauben)
2. Sauerstoffschlauch und Druckmindere verbinden:  
(D1) auf B4 manuell aufschrauben
3. Demandventil und Sauerstoffschlauch verbinden:  
(D) auf (E1) manuell aufschrauben
4. Maske und Demandventil verbinden:  
(F1) auf (E2) manuell aufsetzen

3.

## Gebrauchsanleitung

### atmende Person:

1. Constant flow auf 0 Lt/minute manuell mit (B3) einstellen
2. Maske (F) der betroffenen Person aufsetzen
3. Sauerstoffflasche (A) mit Handrad (A1) langsam manuell aufdrehen

Jetzt ist bedarfsorientierte Sauerstoffzufuhr möglich.

### nicht - atmende Person:

1. Constant flow auf 0 Lt/minute manuell mit (B3) einstellen
2. Maske (F) der betroffenen Person mit C-Griff aufsetzen, auf übergestreckten Kopf achten!
3. Sauerstoffflasche (A) mit Handrad (A2) langsam manuell aufdrehen
4. betroffene Person manuell beatmen durch Knopfdruck (E3), dabei visuelle Kontrolle des sich hebenden Brustkorbes, danach Loslassen des Beatmungsknopfes (E3) zum Absenken des Brustkorbes

sollte der Brustkorb sich nicht heben, bitte überprüfen:

- Kopf der betroffenen Person überstreckt?
- dichtes Abschließen der Maske am Gesicht der betroffenen Person?
- alle Teile dicht verbunden?

### **Achtung!!!**

**Bitte stets beim Arbeiten mit reinem Sauerstoff die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beachten!  
Fernhalten von Zündquellen, offene Flammen vermeiden - nicht rauchen - Funkenbildung vermeiden  
kein Gebrauch von Ölen und Fetten - Sauerstoffflaschen stets sicher lagern**